

PRODUKT PROFIL



one PRIMARY WOUND DRESSING

- one** IST EIN WUNDTHERAPEUTIKUM, BESTEHEND AUS EINER SPEZIELL FORMULIERTEN, SYNERGISTISCH WIRKSAMEN KOMBINATION VON NEEMÖL UND JOHANNISKRAUTÖL.
- one** ERMÖGLICHT EINE «ALL-IN-ONE» BEHANDLUNG VON TRAUMATISCHEN UND CHRONISCHEN WUNDEN SOWIE VON HAUTDEFEKTEN BEI HAUTERKRANKUNGEN.
- one** IST 100% NATÜRLICH, FREI VON KONSERVIERUNGSTOFFEN UND ERMÖGLICHT EINE SCHMERZFREIE «NON-TOUCH» BEHANDLUNG.



ANWENDUNG

- one** gut schütteln.
- one** aus einer Distanz von 5–10 cm direkt auf die gereinigte Wunde und/oder das betroffene Hautareal aufsprühen, so dass ein deutlicher Ölfilm sichtbar wird. Den Ölfilm eine Minute setzen lassen.

Die Wunde mit einer Sekundärauflage abdecken, die dem Wundexsudat angepasst ist. **one** lässt sich auch ohne Sekundärauflage anwenden.

Die Anwendung bis zum Wundverschluss alle 24 Stunden wiederholen.



Wieviel Sprühstöße?

3cm x 3cm Wunde: ca. 4 Sprühstöße pro Anwendung

6cm x 6cm Wunde: ca. 15 Sprühstöße pro Anwendung

17ml Spray: enthält 180 Sprühstöße (ca. 15 bis 30 Anwendungen)

50ml Spray: enthält 540 Sprühstöße (ca. 45 bis 90 Anwendungen)

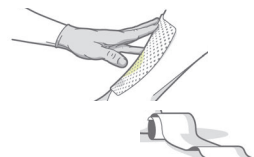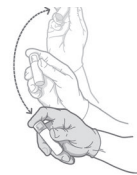

WIRKUNGSWEISE

■ FEUCHTES WUNDMILIEU

Der Ölfilm fördert ein feuchtes Wundmilieu. Dadurch wird die physiologische Wundheilung aktiviert und die Zellproliferation gefördert.

■ ANTIMIKROBIELLER EFFEKT

Die im Ölfilm enthaltenen Fettsäuren wirken antimikrobiell, ohne gleichzeitig zelltoxisch und somit wundheilungshemmend zu wirken.

■ HAUT REGENERATION

Der Ölfilm und die darin enthaltenen Fettsäuren fördern die Regeneration der Epidermis und unterstützen die Vernarbung.

■ SCHMERZARMER VERBANDWECHSEL

Der Ölfilm verhindert, dass die sekundäre Wundaufgabe in der Wunde festklebt. Dies ermöglicht einen atraumatischen und schmerzarmen Verbandwechsel.

TESTIMONIAL





Dr. Fiorella Carnevali




Tierärztin

«Managing horse wounds either presenting or not with exuberant granulation tissue using an innovative wound dressing»

F. Carnevali et al.

Journal of Animal and Veterinary Sciences 2014; 1(2):6-16


«Ich verwende  bei verschiedensten Tierarten wie Pferd, Esel oder Hund mit traumatischen und schlecht heilenden Wunden.  setze ich auch für die Behandlung der defekten Haut bei Hauterkrankungen ein. Mich überzeugt, dass:

-  eine sehr effektive, einfache und schmerzarme «all-in-one» Behandlung verschiedenster Wundarten und von Hautdefekten bei Hauterkrankungen ermöglicht.
-  eine antimikrobielle Wirkung entfaltet ohne gleichzeitig zelltoxisch zu wirken.
-  eine Wundbehandlung ohne Abdeckung ermöglicht.»

Wichtig:

 ist ein Medizinprodukt gemäss Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG.

Die meisten Länder kennen für Veterinärprodukte keine Medizinproduktrichtlinien.

Um ein Medizinprodukt bei einem erkrankten Tier einzusetzen müssen je nach Land gewisse Bestimmungen eingehalten werden. Bitte beachten Sie diese Regeln bevor Sie  einsetzen.

PRODUKTINFORMATIONEN

PRODUKT NAME	☹ PRIMARY WOUND DRESSING®
CE NOTIFIZIERUNG	EU Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG. Medizinprodukt der Klasse IIb – CE 0344
INHALTSSTOFFE	Johanniskraut Rotöl (Oleum Hyperici), Neemöl (Oleum Azadirachtae), Propan, Butan
EINSATZGEBIETE	Akute und chronische Wunden, Hautdefekte als Folge von Hauterkrankungen
KONTRAINDIKATION	Nicht verwenden, wenn zuvor allergische Reaktionen auf einen der Inhaltsstoffe aufgetreten sind.
STABILITÄT	Kann geöffnet bis zum Verfalldatum verwendet werden.
PACKUNGSVARIANTEN	- Spray mit 17ml Volumen - Spray mit 50ml Volumen

Bitte beachten Sie den Beipackzettel.

KONTAKTE

HERSTELLER

Phytoceuticals AG
CH-8008 Zürich
www.phytoceuticals.ch

VERTRIEB

CME Horses GmbH
Dr. Christian Müller-Ehrenberg
D-48157 Münster

Tel.: +49 (251) 37 95 631
Fax: +49 (251) 37 95 273
cme@better4horses.com



WWW.BETTER4HORSES.COM